



## Очиститель энзимный "Оптимед" для очистки МКЛ по ТУ 9398-008-29792921-2009

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Очиститель энзимный «Оптимед» предназначен для очистки всех типов мягких контактных линз во время их хранения в универсальном растворе от различного рода загрязнений, в том числе белковых.

### СОСТАВ

Водный раствор содержит натрий тетраборат 7%, пропиленгликоль 25%, глицерин 25%, панкреатин 1%, кальций хлористый 0,025%.  
Очиститель энзимный «Оптимед» выпускается в пластиковых флаконах с дозатором - капельницей и крышкой с контролем вскрытия объемом 3 мл.

### ДЕЙСТВИЕ

При ношении контактных линз на их поверхности уже с первых минут образуются отложения, в том числе и белковые, которые покрывают всю поверхность линзы в виде плёнки, вызывая раздражение, дискомфорт со стороны глаз.

Нерегулярная очистка линз может привести к серьезным осложнениям со стороны глаз. Очиститель энзимный «Оптимед» при еженедельном применении позволяет эффективно очищать Ваши линзы и способствует более комфортному ношению.

Очиститель энзимный «Оптимед» разрушает отложения на линзе и облегчает их удаление, помогая сохранить линзы чистыми, а ношение - комфортным. Очиститель энзимный «Оптимед» представляет собой концентрированный раствор, содержащий активные компоненты и используется только вместе с универсальным раствором.

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наполните контейнер свежим универсальным раствором.  
Добавьте по две капли очистителя энзимного «Оптимед» в каждое отделение контейнера.

Снимите линзы и промойте их универсальным раствором.  
Положите каждую линзу в соответствующее отделение контейнера. Закройте контейнер и оставьте на ночь или не менее чем на 4 часа.

По истечении времени очистки достаньте линзы из контейнера, тщательно промойте их свежим универсальным раствором, применяя механическую очистку. Линзы готовы к применению.

Использованный раствор из контейнера вылейте, ополосните его свежим раствором, просушите.  
Используйте очистку контактных линз с помощью очистителя энзимного «Оптимед» не реже 1 раза в неделю.

### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Всегда мойте руки перед тем, как снимаете или надеваете линзы.  
Для избежания путаницы всегда начинайте снимать или надевать с одной и той же линзы, например, с правой.  
Перед применением встряхнуть флакон с очистителем энзимным «Оптимед».

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Очиститель энзимный «Оптимед» нельзя закапывать в глаза или принимать внутрь! Беречь от детей! После очистки линзы необходимо промыть! Не использовать в случае аллергии к одному из компонентов очистителя. Не допускать соприкосновения наконечника капельницы флакона с загрязненной поверхностью. Не использовать по истечении срока годности. Соблюдать правила ухода за контактными линзами. Нарушение этих правил может привести к развитию серьезных заболеваний глаз. Не использовать очиститель энзимный «Оптимед» более 6 месяцев после вскрытия флакона.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от 5°C до 30°C и относительной влажности не более 80% при 25°C. Беречь от детей!

### УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Очиститель энзимный по истечении гарантийного срока годности должен быть утилизирован в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими требованиями.

РУ № ФСР 2009/05995 от 29.10.2009  
ТУ 9398-008-29792921-2009



ЗАО «ОПТИМЕДСЕРВИС»  
Россия, 453128, РБ, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 145.  
Адрес для корреспонденции:  
Россия, 450058, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 8.  
Тел./факс: +7 (347) 223-44-33, 277-62-62  
E-mail: market@optimed-ufa.ru, www.optimed-ufa.ru  
Произведено: ЗАО «ОПТИМЕДСЕРВИС»  
Россия, 453128, РБ, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 145.  
Свидетельство на товарный знак № 248690 от 11.06.2003.