



Раствор для увлажнения  
и устранения дискомфорта и сухости  
при ношении мягких контактных линз  
РУ - «Оптимед» по ТУ 9398-007-29792921-2008

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

*Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию  
перед применением!*

### ОПИСАНИЕ

Раствор для увлажнения и устранения дискомфорта и сухости при ношении мягких контактных линз РУ - «Оптимед» (далее - раствор увлажняющий «Оптимед») предназначен для увлажнения и регидратации мягких контактных линз при их ношении, обеспечивает мягкий увлажняющий и успокаивающий эффект, дает ощущение свежести и долговременный комфорт при ношении контактных линз.

Не требует снятия линз перед применением.

Благодаря специальному увлажняющему компоненту - гидроксипропилметилцеллюлозе раствор увлажняющий «Оптимед» обеспечивает мягкое скольжение линзы по поверхности роговицы, длительное увлажнение и комфорт.

### СОСТАВ

Раствор для увлажнения и устранения дискомфорта и сухости при ношении мягких контактных линз РУ - «Оптимед» представляет собой стерильный водный раствор, содержащий натрий хлористый 0,7%, ЭДТА 0,05%, ПГМБ 0,001%, твин 80 0,0015%, увлажняющие добавки: ГПМЦ 0,3%, глицерин 0,2%, боратный буфер.

Раствор увлажняющий «Оптимед» выпускается в пластиковых флаконах с дозатором - капельницей и крышкой с контролем вскрытия объемом 10 мл.

### ПРИМЕНЕНИЕ

По мере необходимости капните в каждый глаз по 1 или 2 капли.  
Для дополнительного комфорта используйте перед надеванием по 1 или 2 капли на каждую линзу.

Для облегчения снятия и предотвращения повреждения линзы используйте перед снятием по 1 или 2 капли на каждую линзу.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Необходимо соблюдать правила по уходу за линзами, рекомендованные Вашим врачом. Несоблюдение указаний может привести к серьезным заболеваниям глаз.

Не использовать раствор в случае повышенной чувствительности к компонентам раствора.

Во избежание загрязнения раствора не допускать соприкосновения наконечника флакона с посторонними предметами.

Использовать раствор не более 1 месяца после вскрытия флакона.

Не использовать по истечении указанного срока годности.

Не использовать в случае нарушения целостности упаковки.

Использование каких-либо лекарственных препаратов для глаз одновременно с раствором допускается только под наблюдением врача.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от 5°C до 30°C и относительной влажности не более 80% при 25°C. Беречь от детей!

### УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Раствор увлажняющий по истечении гарантийного срока годности должен быть утилизирован в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими требованиями.

ЗАО «Оптимедсервис»:

Россия, 453128, РБ, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 145

Адрес для корреспонденции: Россия, 450058, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 8

Тел./факс: +7 (347) 223-44-33, 277-62-62

E-mail: market@optimed-ufa.ru, www.optimed-ufa.ru

Произведено: ЗАО «Оптимедсервис»,

Россия, 453128, РБ, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 145.

ТУ 9398-007-29792921-2008, РУ ФСР 2008/03804 от 15.12.08.

Свидетельство на товарный знак № 248690 от 11.06.2003.

