

Инструкция по применению

Гидрогель офтальмологический ВИЗМЕД® мульти 10 мл.
Флакон-капельница на 250 доз

Показания к применению:

Первичный синдром «сухого глаза» и симптоматика синдрома «сухого глаза» и/или повреждения передней поверхности глаз при поверхностном кератите и синдроме Шегрена. А также для увлажнения поверхности глаз при жалобах, не имеющих патологического происхождения: ощущение «сухости» глаз, чувство инородного тела, усталость глаз и прочее, - вызванных ношением жестких или мягких контактных линз, длительной работой с монитором компьютера, кондиционированием помещения, пылью, сухим воздухом, ветром или холодом.

Состав:

Основной компонент: гиалуронат натрия, высокоочищенный, полученный методом бактериальной ферментации.

1 мл раствора содержит: гиалуронат натрия 0,18 %, хлорид натрия, хлорид калия, динатрия гидрофосфат, цитрат натрия, хлорид магния, хлорид кальция, вода очищенная или вода для инъекций. Раствор гипотонический (150 мОсм/л), доведен до pH 7,3.

Форма выпуска:

Стерильный гидрогель офтальмологический, содержащий 0,18% гиалуроната натрия, для местного применения, в многодозовом флаконе-капельнице объемом 10 мл на 250 доз (капель). Без консервантов.

Способ применения и дозы:

Удалите предохранительное кольцо перед первым использованием (рис.1). Осторожно снимите колпачок с контейнера (рис.2). Не касаясь сопла дозатора, переверните контейнер дозатором вниз, зафиксировав между большим и указательным пальцами. Перед началом использования рекомендуется прокачать дозатор до появления первой капли раствора путем нескольких нажатий указательным пальцем сверху на контейнер. Если нет особых указаний, закапайте 1-2 капли в конъюнктивальный мешок, оттянув нижнее веко (рис.3). Возможно легкое замутнение зрения в первые 1-2 минуты после закапывания. При моргании жидкость равномерно распределится по поверхности глаза, образуя идеально гладкое длительное защитное покрытие поверхности глаза прозрачным слоем. Визмед® мульти можно закапывать с любыми (жесткими или мягкими) контактными линзами, не снимая их и не замутняя зрения.



Предосторожности:

Избегайте контактов наконечника контейнера с поверхностью глаза и кожей. После использования наденьте колпачок на контейнер (рис.4). При видимых повреждениях контейнера применять Визмед® мульти не следует. После вскрытия флакона раствор можно использовать в течение 3 месяцев.

Хранить при температуре от 2°C до 25°C! Не использовать Визмед® мульти по истечении срока годности, указанного на упаковке. В случае, если во время использования Визмед® мульти дискомфорт сохраняется, необходимо проконсультироваться с врачом. Хранить в недоступном для детей месте!

Характеристики и действие препарата:

Визмед® мульти представляет собой раствор высокоочищенного гиалуроната натрия, полученного методом бактериальной ферментации. Гиалуронат натрия – натуральный полимер, который присутствует в тканях глаза человека. Его основная физическая характеристика – вязкоэластичность. Это означает, что Визмед® мульти имеет высокую вязкость между морганием и низкую вязкость во время процесса моргания, что обеспечивает эффективное обволакивание поверхности глаза, предотвращающее сухость и раздражение. Гиалуронат натрия также, обладая адгезивными свойствами и способностью задерживать воду, похож по действию на прероговичную слезную пленку, что совместно с обволакивающим свойством гиалуроната натрия приводит к увеличению продолжительности действия слезной пленки на поверхности глаза. Включение в состав Визмед® мульти цитрата натрия помогает поддерживать вязкоэластичные свойства препарата в присутствии других ионов.

Гипертоничность измененной слезной жидкости приводит к ее проникновению в роговичные царапины. Гипотоничность Визмед® мульти, компенсируя гипертоничность измененной слезной жидкости, ограничивает повреждение роговицы.

Биологическая совместимость:

Результаты исследований острой, подострой и хронической токсичности совместно с результатами исследований плодной токсичности, фертильности, предродовой и послеродовой токсичности показывают, что гиалуронат натрия очень хорошо переносится. Экспериментальные и клинические испытания также подтверждают хорошую переносимость Визмед® мульти.

Лекарственное взаимодействие:

Одновременно применять Визмед® мульти с другими препаратами для лечения глаз не рекомендуется (рекомендуемый интервал не менее 30 мин), так как это может ухудшить действие препарата.

Срок годности: 3 года в оригинальной упаковке. После первого использования годен в течение 3 месяцев.

Упаковка: флакон-капельница объемом 10 мл на 250 доз (капель).

Рег. уд. №ФСЗ 2009/05290 от 23 октября 2009 года

Производитель: ТРБ Чемедика АГ (Германия)

Представитель в РФ:

Представительство ТРБ Чемедика Интернешнл С.А.

107065, Москва, Алтайская ул., д.5

Телефон: (495) 210-98-27 marketing@trbchemedica.ru